

1. Odkrúťte a zahodte krytku lancety.

NEŤAHAJTE JU.

2. Zariadenie pevne pritlačte na zvolené miesto a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

Zahodte do nádoby vhodnej na ostré predmety.

Sterilné odberové perá na jedno použitie

Odberové pero na jedno použitie

Na použite so systémami na monitorovanie glykémie

Vzhľadom na riziko prenosu infekcie, je toto zariadenie na jedno použitie určené na samotestovanie jedného užívateľa. Opätovné použitie tohto zariadenia na jedno použitie bude mať vplyv na bezpečnosť, funkčnosť a účinnosť a vystavuje užívateľa zbytočným rizikám. Nepoužívajte, ak bola krytka už skôr (predtým) odstránená.

Obsah balenia: 200 ks

Distribútor

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Abbott Diabetes Care

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Slovenská republika

Bezplatná infolinka: 0800 189 564

ICL20790 Rev.B / TPOR-A4SGPT